

Otinova[®] ørespray

2018-171

Forpakning og holdbarhet

20 ml øresprayflaske som inneholder 15 ml løsning (150 doser).

Holdbarhet i romtemperatur: 3 år fra produksjon (se dato på forpakning og flaske), åpnet flaske 6 måneder.

Distribueres i Sverige av Tamro og Oriola, artikkelnummer: 820685

GTIN-13: 7 30000902 863 4

Referanser

Oppgis på forespørsel av ABIGO Medical AS eller Amellova AB.

www.otinova.no

Indikasjon

Profylakse og behandling av øregangsbetennelse (ekstern otitt, svømmeøre).

Produktbeskrivelse

Otinova ørespray er et velprøvd og vitenskapelig/klinisk dokumentert egenpleieprodukt som effektivt og sikkert forebygger og behandler øregangsbetennelse.

Otinova er registrert hos Läkemedelsverket som medisinteknisk produkt, klasse 1, for indikasjonen behandling og profylakse av ekstern otitt (MDD 93/42/EEC).

Otinova selges reseptfritt på apotek.

Innhold og virkningsmekanisme

Otinova inneholder aluminiumacetat og aluminiumacetotartrat (1,8 % aluminium), eddiksyre (8,25 %), vann, pH 3-4 (Burows væske). Otinova inneholder ikke antibiotika.

Otinova virker lokalt uttørkende, er kløestillende og har en bakterie- og sopprepende effekt.

Dosering og bruk

Otinova sprayes 1-2 ganger i hvert øre, i øregangen, hver morgen og kveld. Det er viktig å lene hodet mot siden etter spraying slik at væsken kommer lengst mulig inn i øregangen.

Ikke bruk Otinova kontinuerlig i mer enn 7 dager.

Otinova kan brukes av både barn (>5 år) og voksne.

Les pakningsvedlegg for bruk.



ABIGO Medical A/S
Eidsbergveien 43, 1811 ASKIM, Norge
Tel +47 91136332
info@abigo.no www.abigo.no

AMELLOVA AB
Ett företag inom Abigo Gruppen